

Karkludvrider – til svage hænder

Varenummer: 200140



“Easy Squeezy” gør det muligt for svage og smertefulde hænder at vrider karklude godt, så de bliver dejligt fugtige til rengøring i køkkenet.

- Bruges direkte i vasken
- Nem at bruge for personer med svage og ømme hænder
- Kompakt og brudsikkert design
- Tåler opvaskemaskine

Svage hænder gør det svært at vrider en karklud ordentligt – og uden en godt fugtig karklud bliver køkkenet hurtigt rodet.

Vi er meget glade for at kunne præsentere “Easy Squeezy”, et meget praktisk og kompakt hjælpemiddel. Tests har bekræftet, at “Easy Squeezy” er meget populær blandt personer med gigt.



Fjern stemplet fra røret. Læg den våde karklud ned i røret.



Brug din kropsvægt til at presse hårdt ned på stemplet. Tryk et par gange.



Løft karkludepresseren og tag karkluden ud fra den nederste ende af røret.

Easy Squeezy - Karkludvrider 200140

Læs venligst instruktionen omhyggeligt, så du ved om sikker brug af produktet

Er der nogen spørgsmål om brugen af produktet, som ikke er besvaret i denne vejledning, skal du kontakte producenten eller leverandøren for ydeligere information.

1. Påtænkte anvendelse / formål

Karkluds press kan bruges af personer til personer, der ikke har så meget styrke i hånden.

2. Kontrol før brug:

Før du bruger produktet:

- kontroller, at produktet er ubeskadet
- Vask produktet før brug i varmt vand med opvaskemiddel eller opvaskemaskine

3. Produkter som er omfattet af denne instruktion:

| | |
|------------------------------|-----------|
| 200-140-presse Easy Squeezzy | Hvid/sort |
|------------------------------|-----------|

4. Anvendelse og information:

Easy Squeezy karklud pressen gør det lettere eller muligt i dagligdagen at bruge en karklud.

- Let at bruge for folk med svage og smertende hænder
- Bruges direkte i køkkenvasken
- Lille og holdbar
- Kan rengøres i opvaskemaskinen

Hvis man har svage hænder er det ofte svært at vrider en karklud -og uden en fugtig klud er det vanskeligt at holde køkkenet ordentligt rent. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere "Easy Squeezy" Som er lille og let at anvende.

5. Tilbehør:

Ingen

5.1 Sikkerhedsoplysninger karklud presse tilbehør:

Tjek at bunden og toppen sidder rigtig og placerer så karkludspresseren i vasken.



6. Bortskaffelse:

Dagrenovation - plast (følg de lokale regler)

7. Materiale og symboler

PP + EPDM gummi



Fabrikant

Kvalitetsstyringsystem - ISO9001

Fremstilling har en certificeret kvalitetsstyringsystem i henhold til ISO 90001

9. Fabrikant:

Rika Plast A7S Sauntebygade 12.
DK 3100 Hornbæk. Danmark.